

2012年 7月吉日

お客様各位

株式会社ミクニ
コンシューマ事業部
シニアプロダクツチーム

ミクニマイティエースⅡをご使用のお客様へ
停電時の対応に関するお知らせ

拝啓

時下ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
早速ではございますが、ミクニマイティエースⅡの停電時の対応について
ご案内させていただきます。

敬具

記

ミクニマイティエースⅡは急に停電になったり、復帰（通電）した場合でも特に機器に故障する等、悪影響等はありませんが、リモコンの下降スイッチを押している状態で停電になった場合、リモコンの下降スイッチから手を離すまで停止しません。一度下降スイッチから手を離すと通電するまで動かなくなります。

使用中停電等が発生して通電できない状態になると上記の場合以外は動作いたしません。
その場合は速やかに安全な場所を確保していただき、標準装備の非常降下装置をご使用いただき、手動で降下させていただきます。
(詳しい操作方法につきましては、裏面をご覧ください)

オプション設定させていただいております非常用バッテリーキットをご使用いただきますと、停電時もマイティエースⅡがご使用いただけます。非常時、緊急時のバックアップとしては是非ご検討いただけましたら幸いです。

非常用バッテリーキットの詳細は別紙に記載させていただいております。
今後とも弊社製品をご愛顧いただけますよう、切にお願い申し上げます。

株式会社ミクニ コンシューマ事業部 シニアプロダクツチーム


TEL : 0465-35-8431 FAX : 0465-35-9272

E-mail: fukushi@mikuni.co.jp

HP: <http://mikuni-care.jp/>

以上

【停電時の非常降下 操作方法】

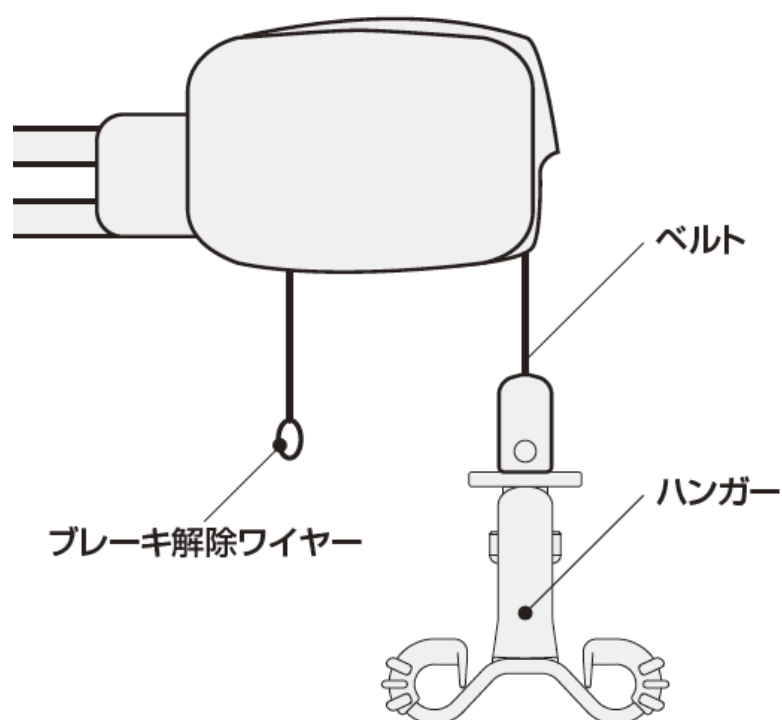

ハンガーが上方で下降しなくなった場合で、AC/DC 電源を使用中のときは、電源スイッチを切り、ベルト巻き上げユニットに付いているブレーキ解除ワイヤーを引っ張りながら、ベルトを下方に引っ張ってください。ゆっくりと下降していきます。

介護される方の体重によっては、下降してこない場合があります。その場合は、介助者がハンガー部分に体重をかけるように引くと、ゆっくりと下降してきます。

(※取扱説明書 23ページにも記載がございます)

ミクニマイティエースII 非常用バッテリーキットのご案内



平素は、ミクニマイティエースシリーズをご愛顧いただき、ありがとうございます。

今年の夏も、電力不足による計画停電が予定されている地域もございます。計画停電中・緊急停電中は、家庭用電源を使う福祉用具が使用できなくなります。

多くのお客様から、計画停電又は緊急の停電時でも電源の供給ができ、リフトを使用できるオプションパーツが欲しいとのご要望をいただいております。

そこでこの度、「ミクニマイティエースシリーズ用・非常用バッテリーキット」をご案内させていただきます。

商品詳細について、本書をもってここにご案内させていただきます。

価格、使用方法等につきましては、弊社又は弊社製品販売店までお問い合わせください。

今後とも弊社製品をご愛顧いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。



セット内容




- ・バッテリー
- ・バッテリー用ケーブル
- ・充電用ケーブル




使用方法

- ① 24V電源BOXのリフト側のケーブルをコネクターを回して外します。

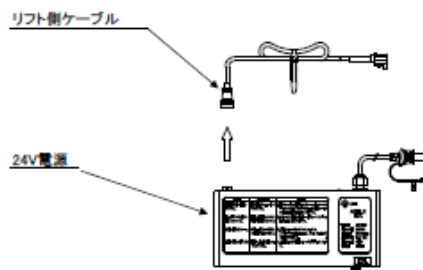


- ② ①で外したケーブルにバッテリーケーブルとバッテリーを接続します。

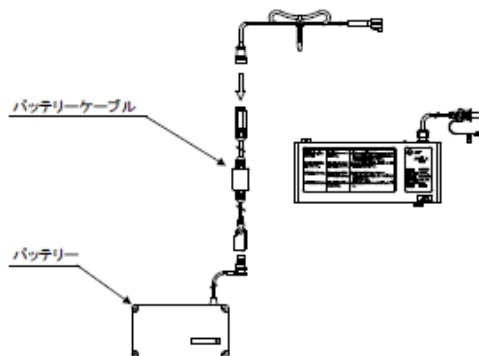

- ③ リフト本体のLEDが点灯すれば準備完了です。

充電方法

下図のようにバッテリーと充電器のコネクターを接続し、家庭用AC100Vコンセントへ接続して完了です。

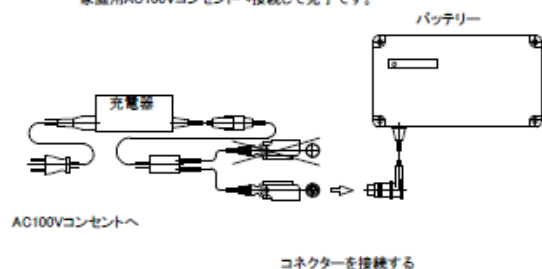

※充電が始まるとバッテリーのLEDランプが緑色に点滅します。満充電になると緑色のLEDが点灯になりますので、コンセントから外してください。